

セフティカテ 自己導尿用バルーン

品目コード	サイズ	外径	全長	バルーン容量	JANコード
800 002 1120	12Fr	4.0mm	400mm	5mL	4542187249095
800 002 1121	14Fr	4.7mm			4542187249101
800 002 1122	16Fr	5.3mm			4542187249118
マーカー：先端から100～200mmまで50mm間隔 側孔：2孔					

付属品：フィルターキャップ、リザーバー、ケース 2本/箱・未滅菌

一般の名称 : 間欠泌尿器用カテーテル
 販売名 : セフティカテ 自己導尿用バルーン
 医療機器認証番号 : 304AABZX00042A01
 製造販売業者 : 大塚テクノ株式会社
 販売業者 : クリエイトメディック株式会社
 ホームページ : <https://www.createmedic.co.jp>

カテーテル フィルターキャップ

品目コード	JANコード
800 002 1129	4542187249187

2個/箱・未滅菌



クリニー自己導尿カテーテルシリーズ



販売名
セフティカテ



販売名
セフティカテ(ピュールケース)



販売名
セフティカテ ファストケース

※ご使用にあたっては、必ず取扱説明書と電子添文をご一読ください
 泌-053-A 2025.01.7,000

セフティカテ 自己導尿用バルーン

クリニー自己導尿カテーテルに間歇バルーンタイプが新登場



ご使用方法の動画



間歇バルーンカテーテルとは

バルーンを膨らまし、一時的に膀胱内に留置することで排尿管理が可能な、
再利用型バルーン付きの自己導尿カテーテルです
以下の場面でご活用いただけます



出勤や通学等日中の外出時




夜間多尿等での夜間の使用



旅行等でトイレ設備のない時

〈構成〉

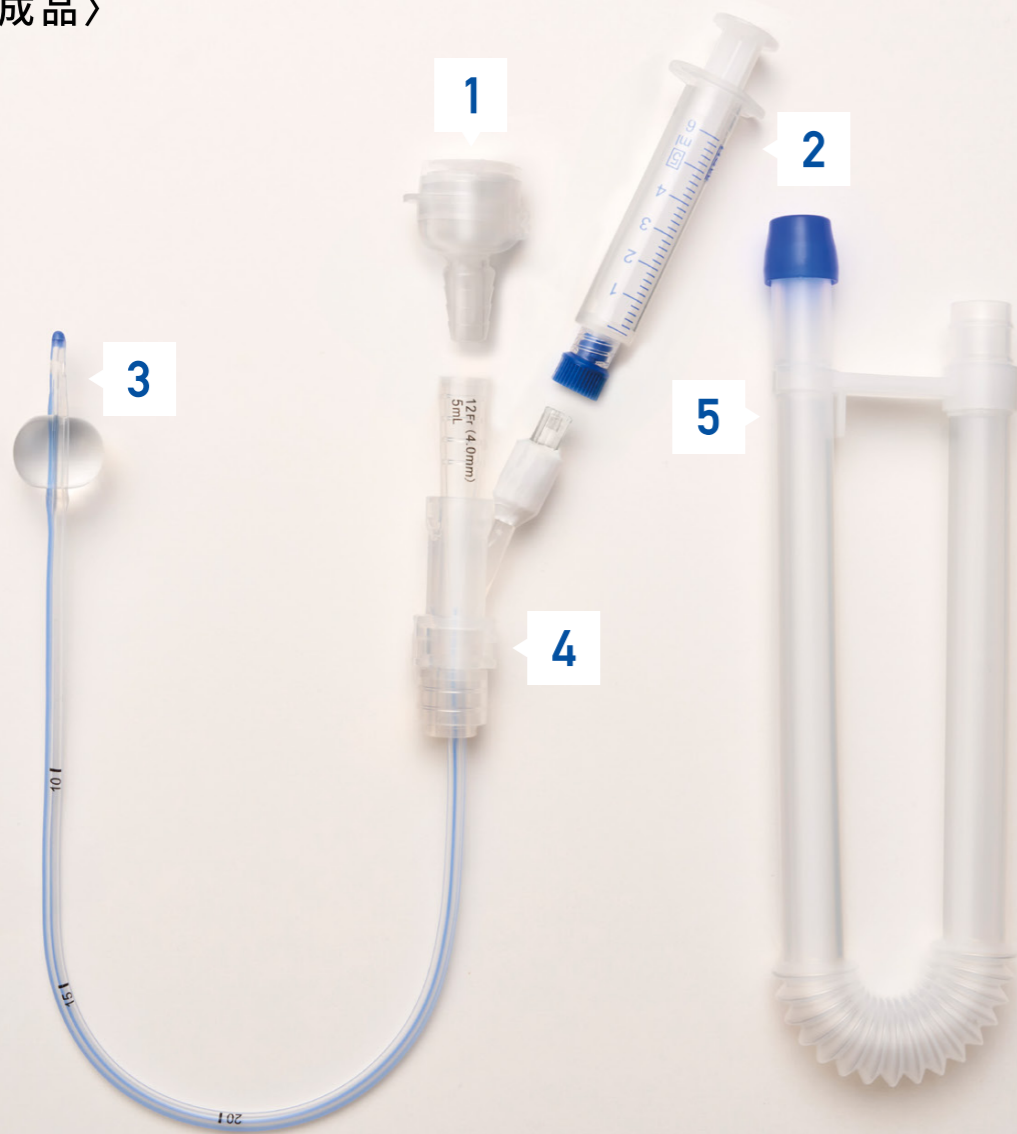


1

空気のみを通過させ、
液体は通過させない疎水フィルター付きキャップ

〈疎水フィルター付きキャップのメリット〉

疎水フィルターは空気のみを通過させ、液体は通過させない為、以下の場面で活用されます

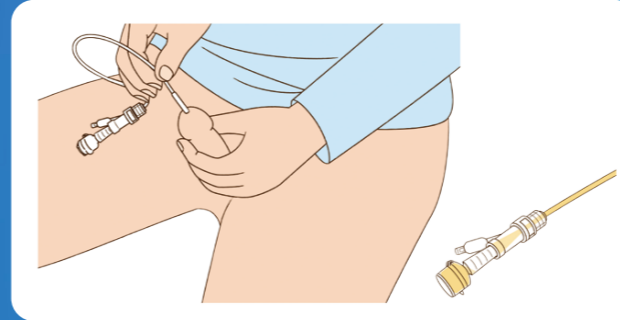

キャップのフタを閉じた状態でも、
尿流を確認できます

※挿入しても、尿がキャップまで流れてこない場合、
フタを開け、尿が出てくるのを確認します



※イメージ
(消毒液は青く着色しております)

キャップのフタを閉じた状態でも
保管時に消毒液がカテーテル内に満たされるので、
清潔にご使用いただけます

※キャップの使用状況によっては、
カテーテルの内側に消毒液が満たされない場合があります
その場合はキャップのフタを開けてください

2

容易にバルーンを
膨らませることが可能な
シリンジタイプのリザーバー




3

柔軟性が高く
膀胱にやさしい
シリコーン製カテーテル



4

導尿時に
しっかりと把持し易く
操作性に配慮した形状

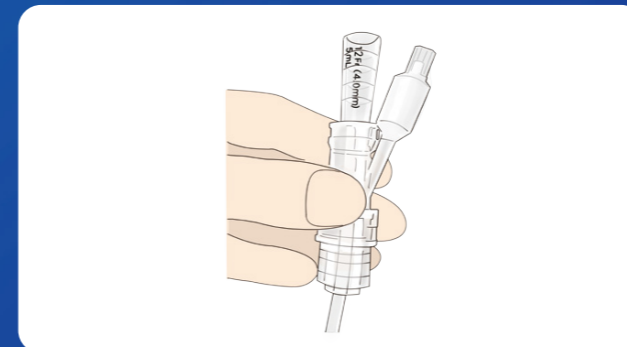

5

ケースとフックが一体型で
手すりやバーに
引っ掛けることが可能

